
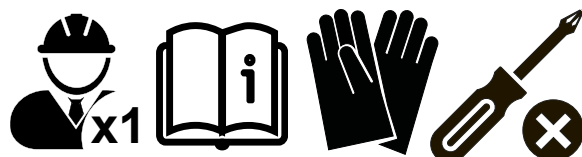


Шкаф для палат MF LN-1 1940.1

ПРОМЕТ




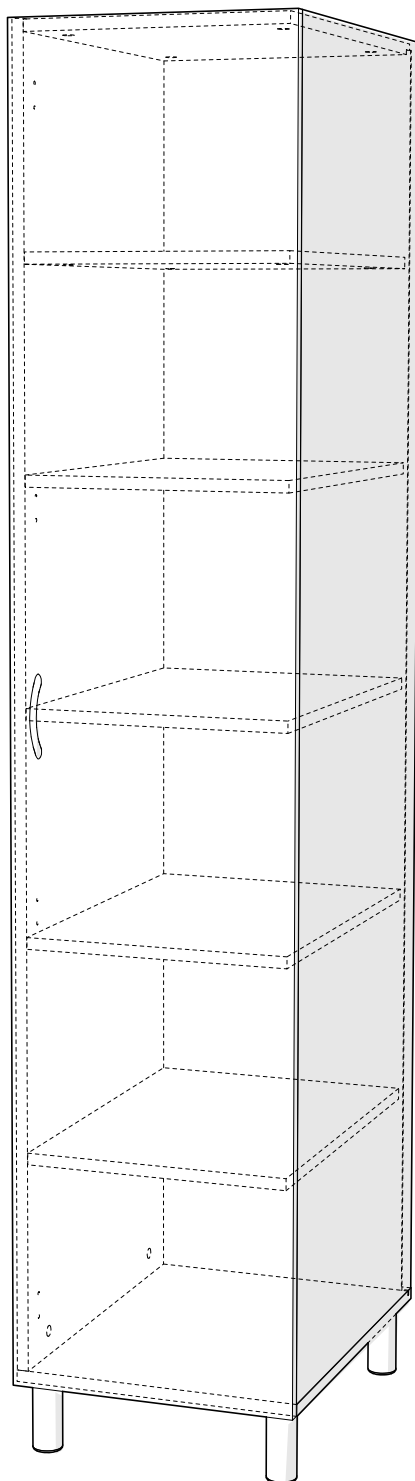


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф серии MF LH предназначен для хранения рабочей и личной одежды и вещей в больницах, родильных домах, лечебных стационарах и других помещениях

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

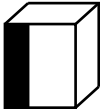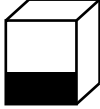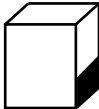
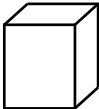
Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
MF LH-1 1940.1	1926	400	550	41.1

* - допустимое отклонение +/- 10%


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Крышка	1	6	Дно	1
2	Полка несущая	1	7	Полка	4
3	Стенка левая	1	8	Дверь	1
4	Стенка правая	1	9	Комплект фурнитуры	1
5	Стенка задняя	1			


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

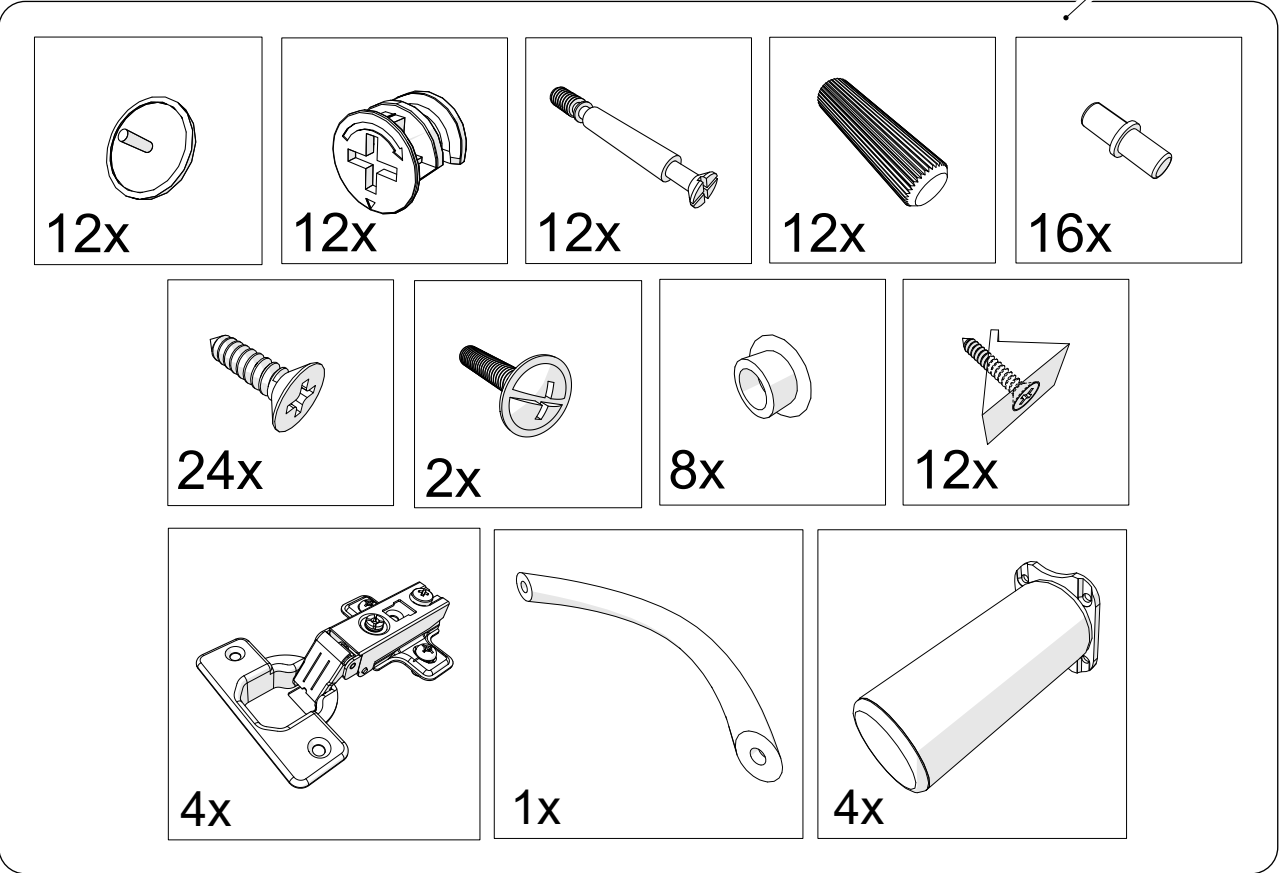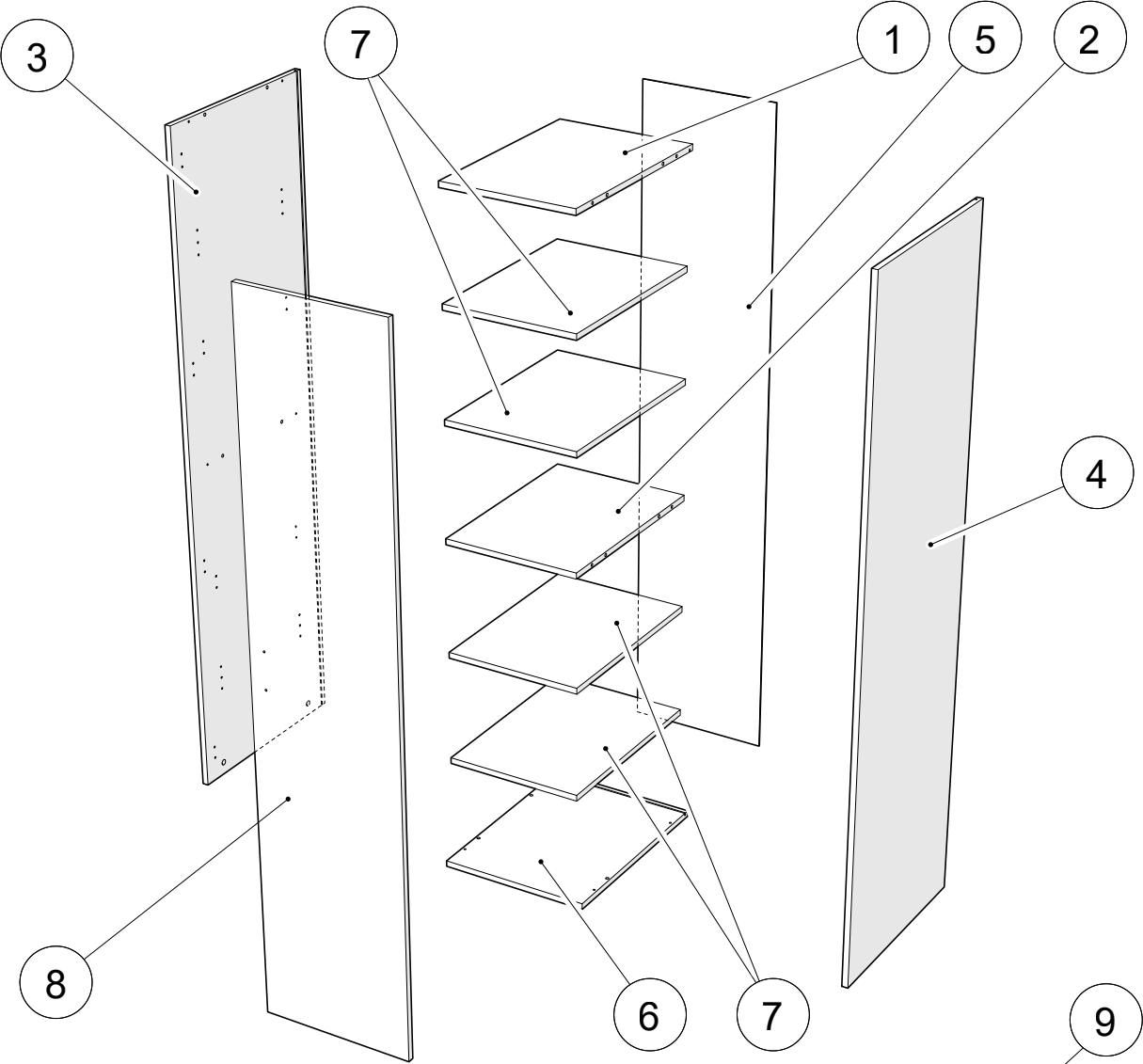


1

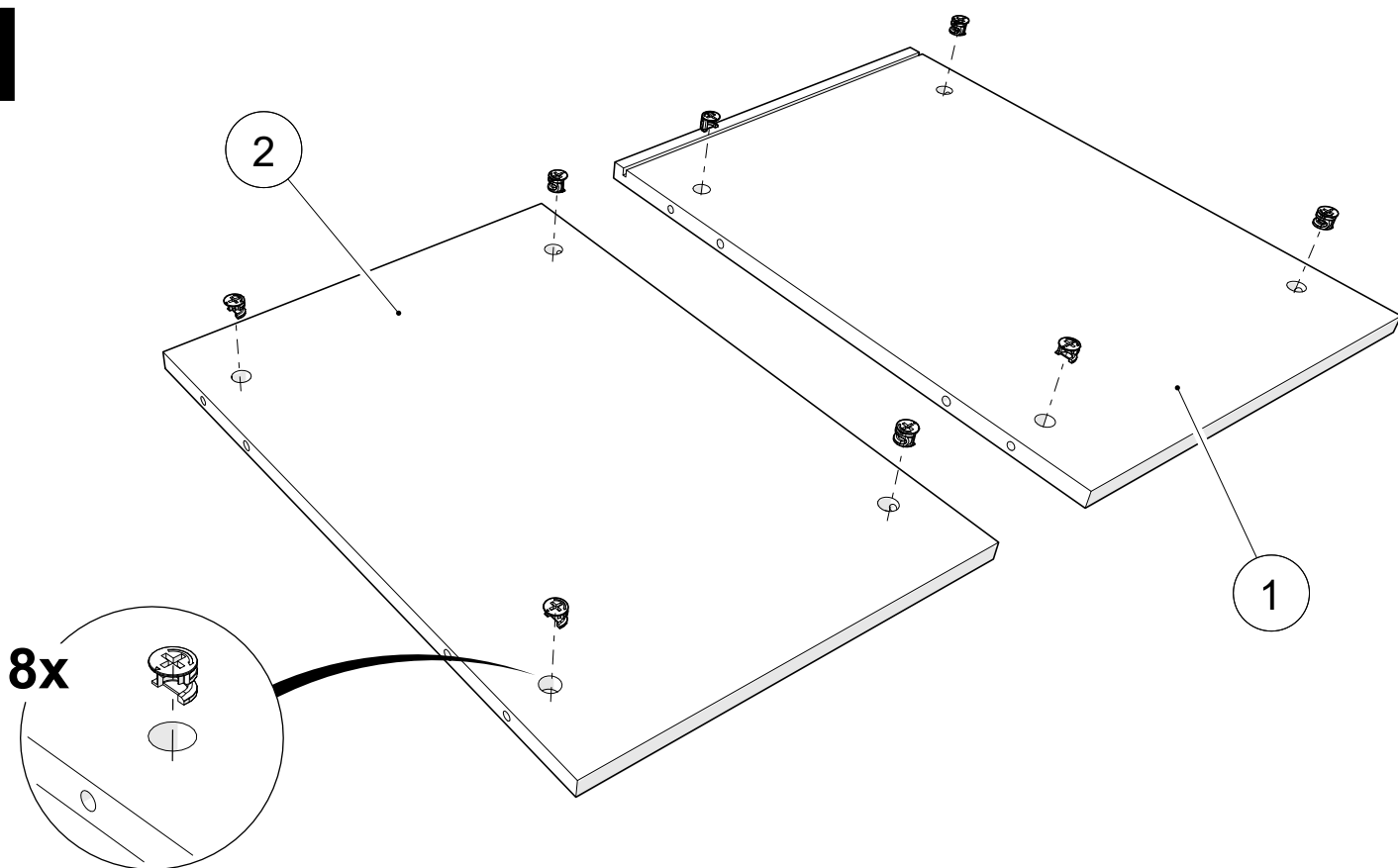


2

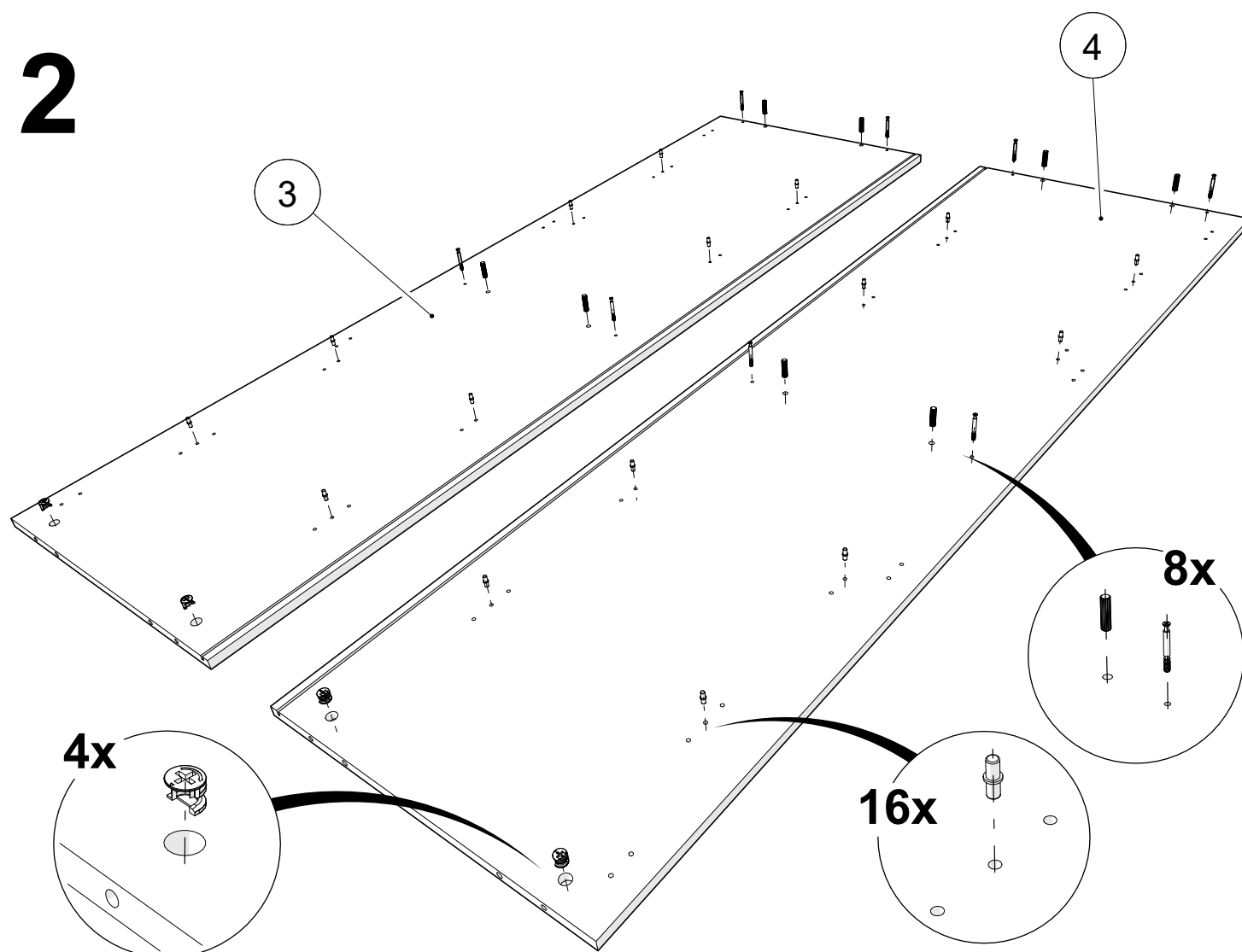


3

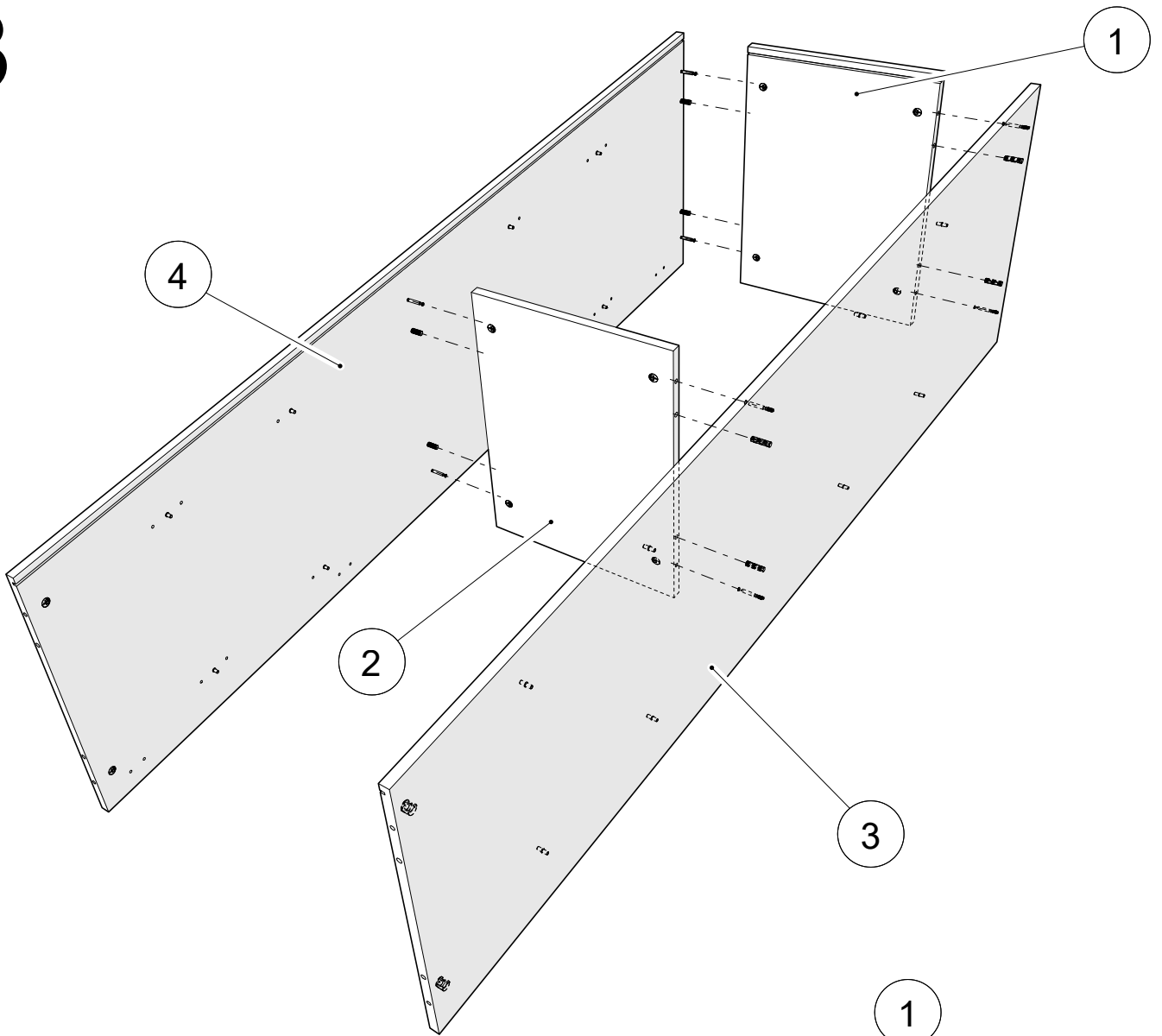


4

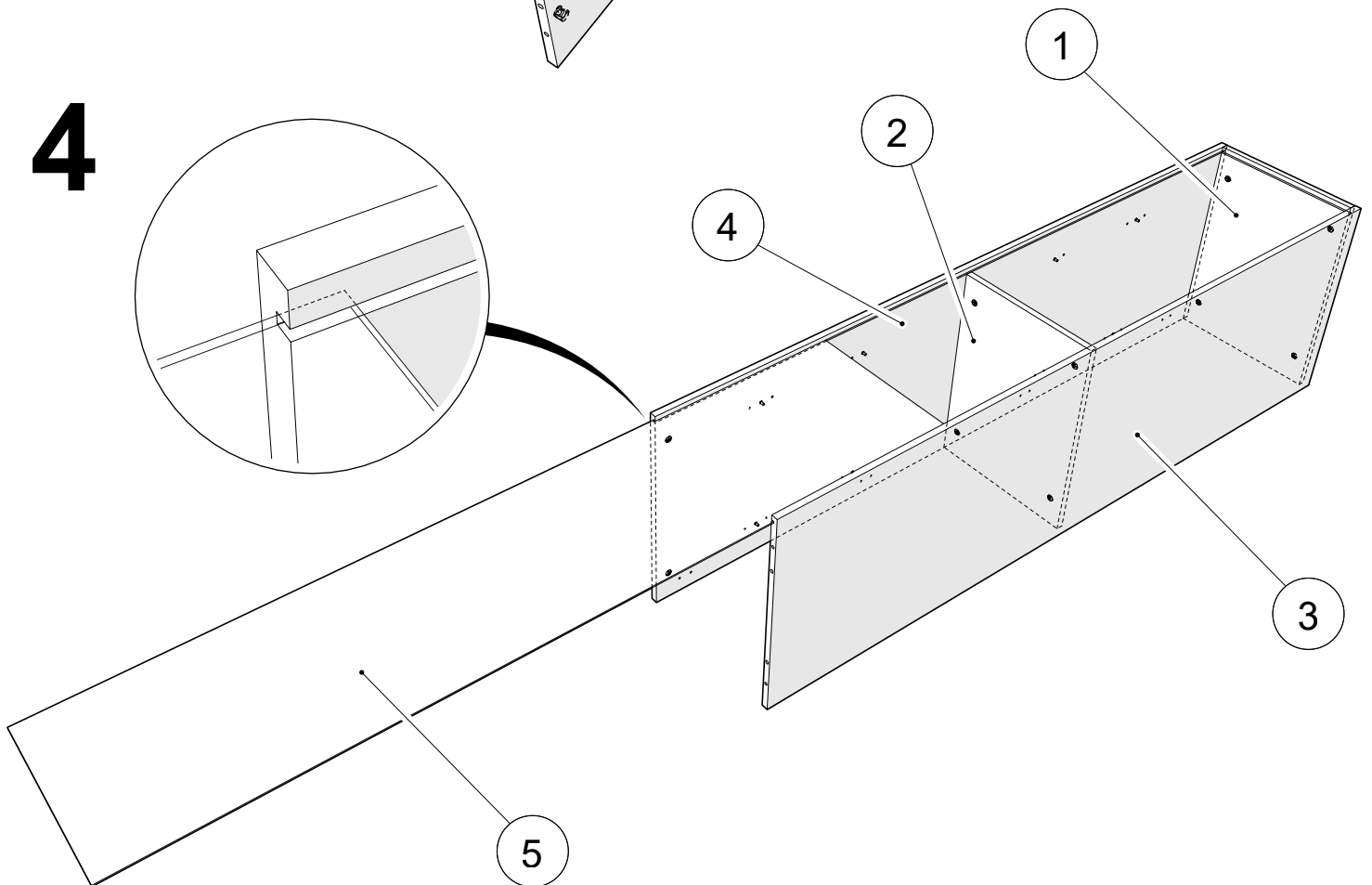


5

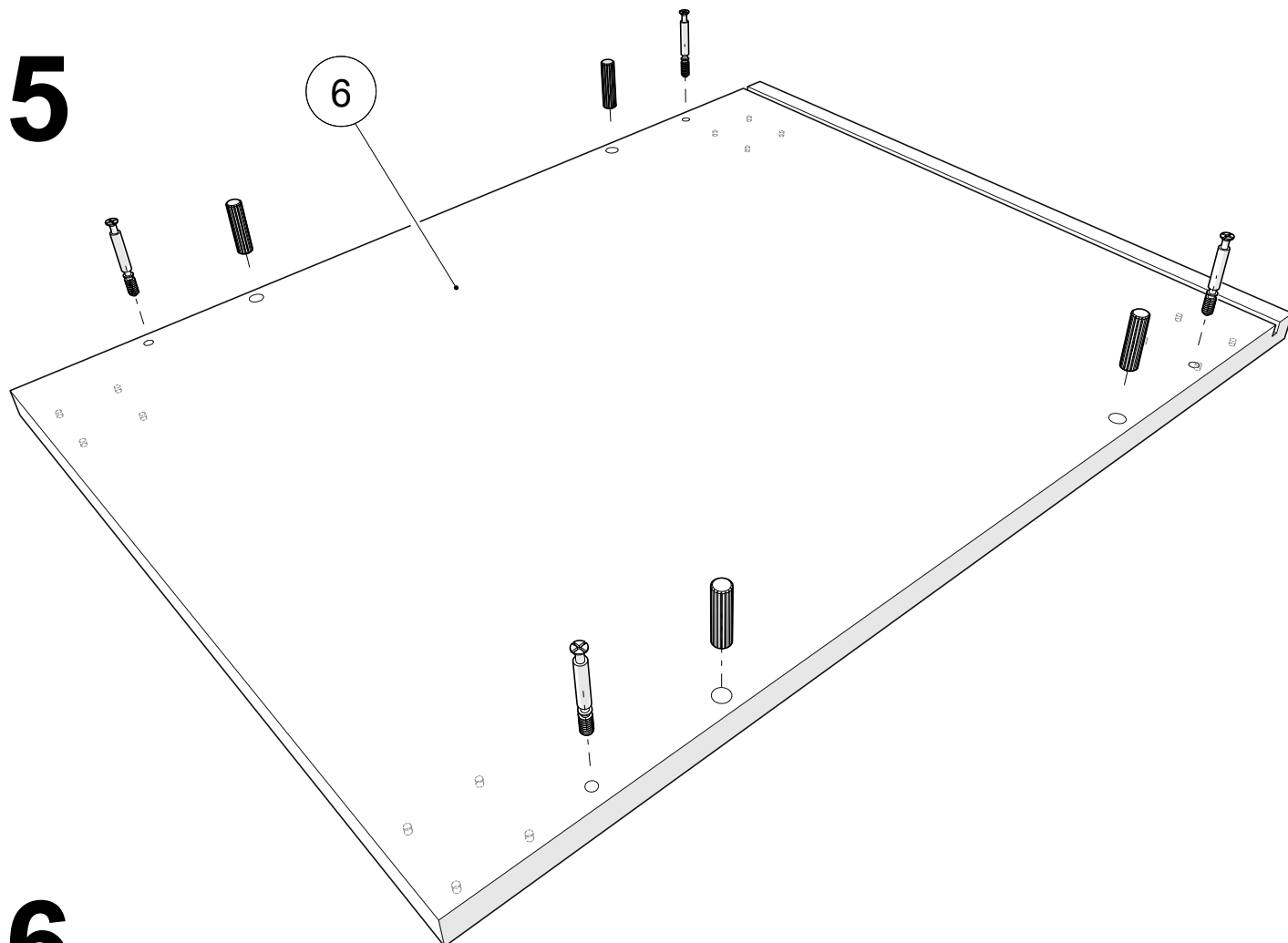


6

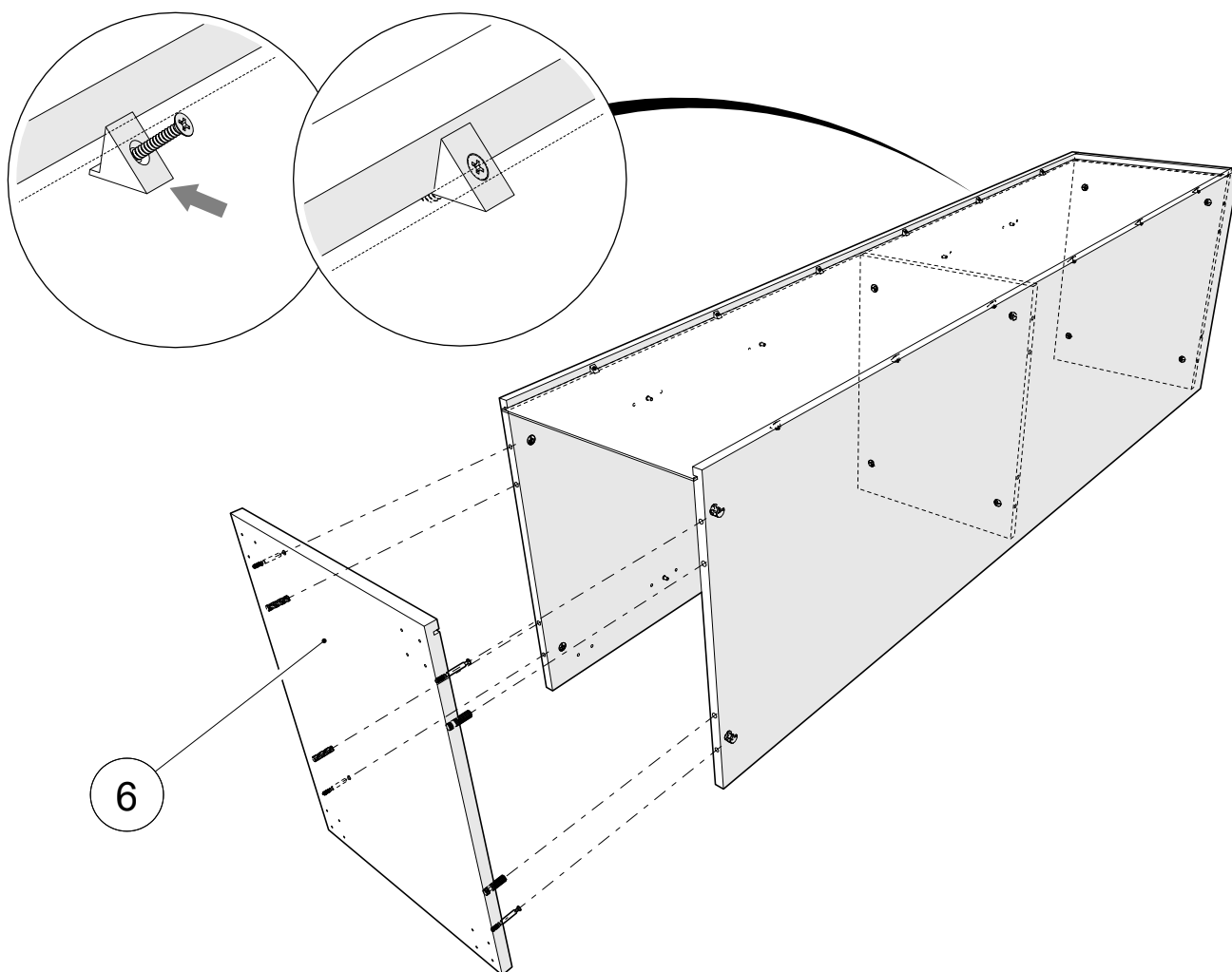


7

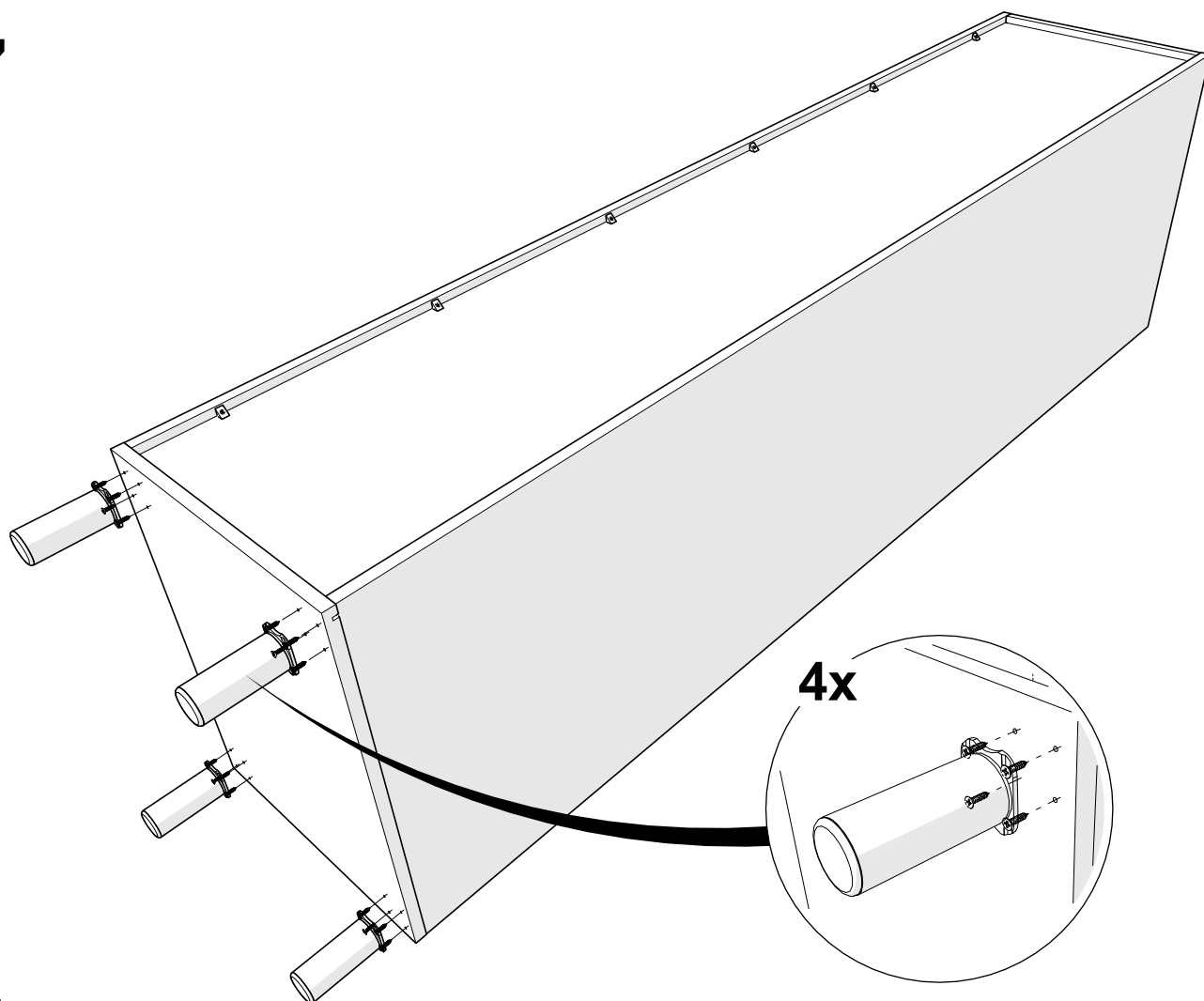


8

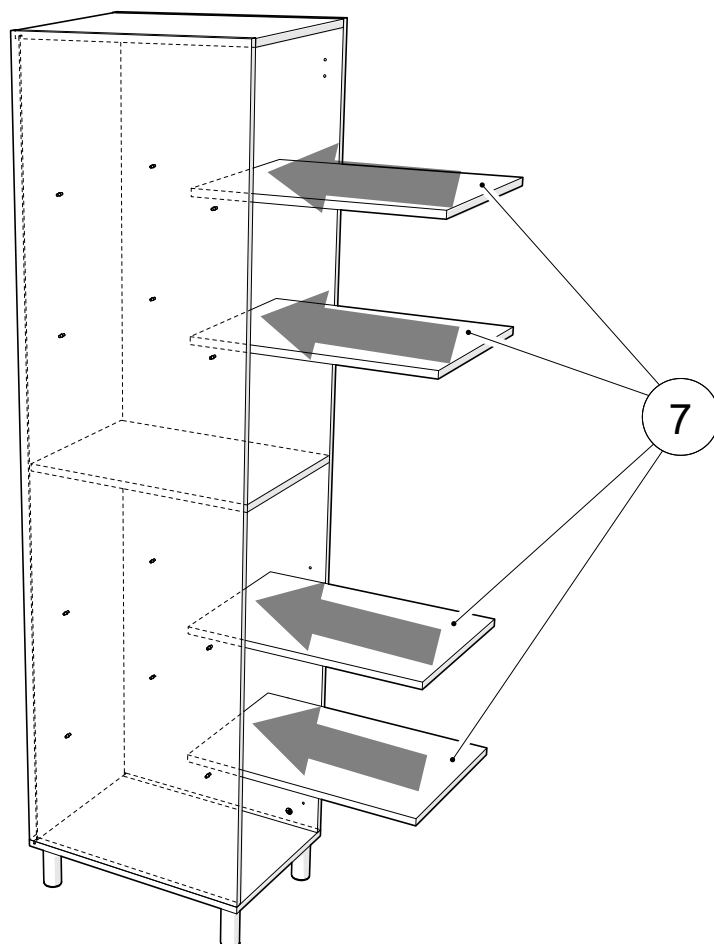


9

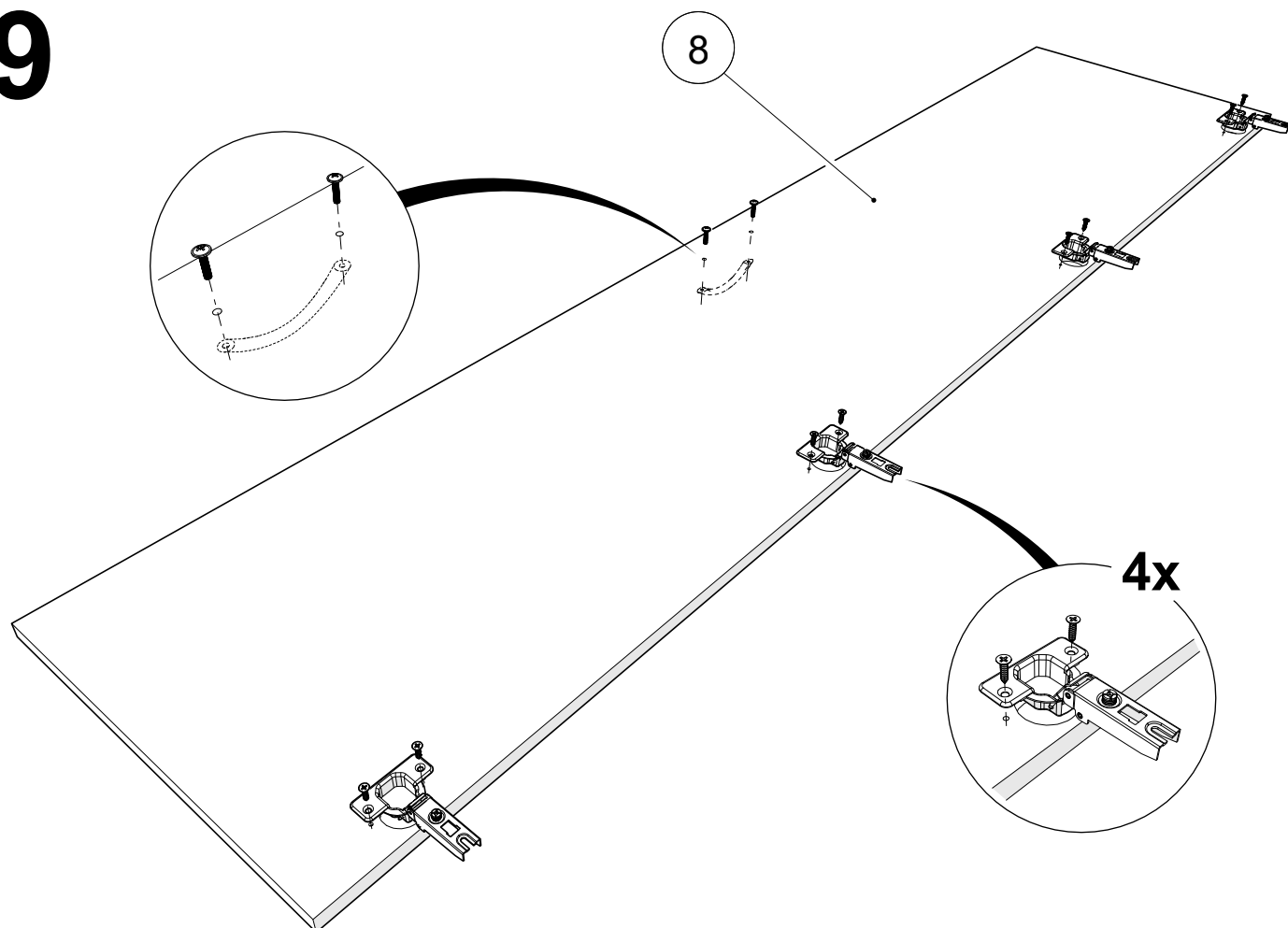


10

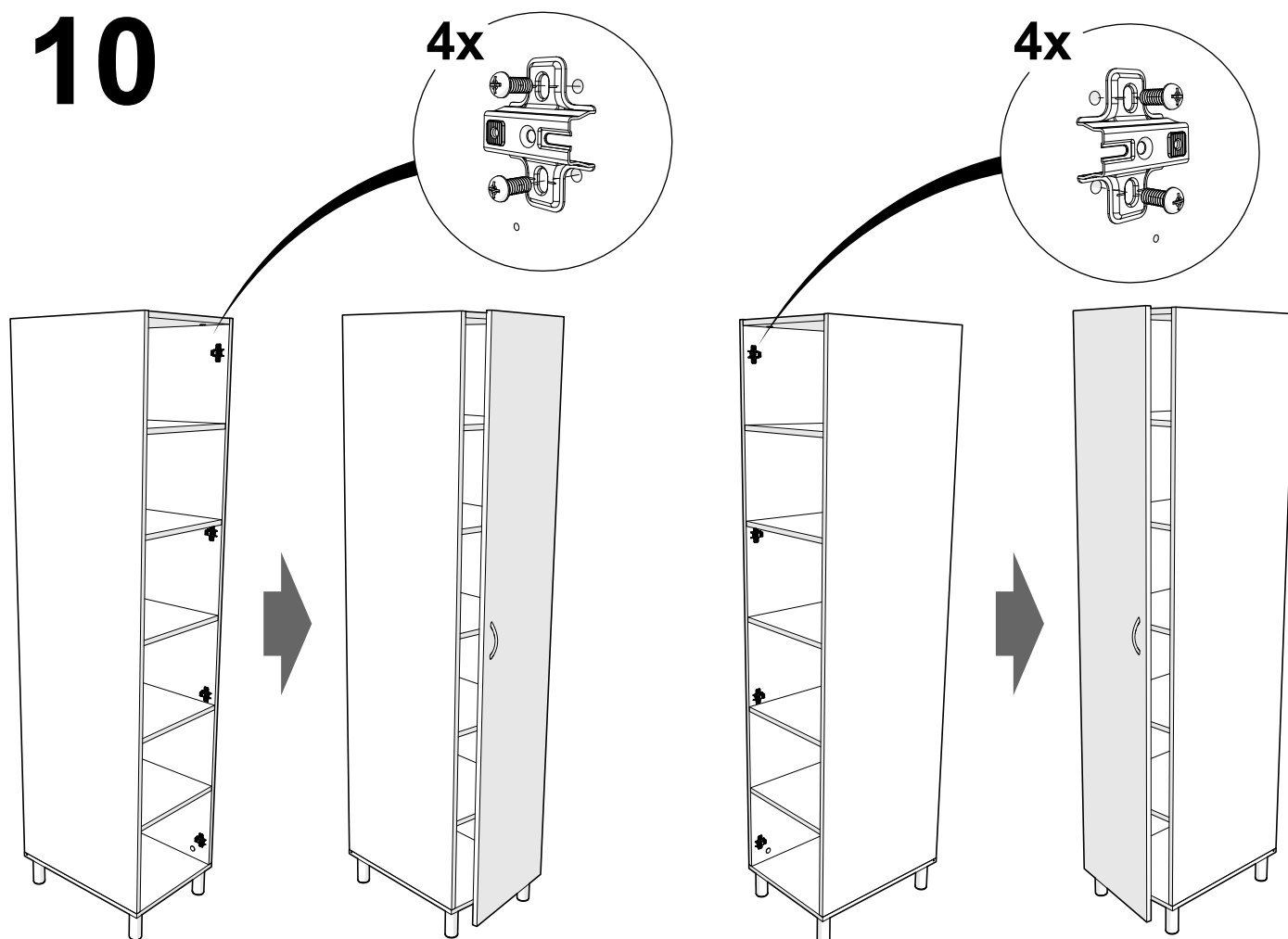


11

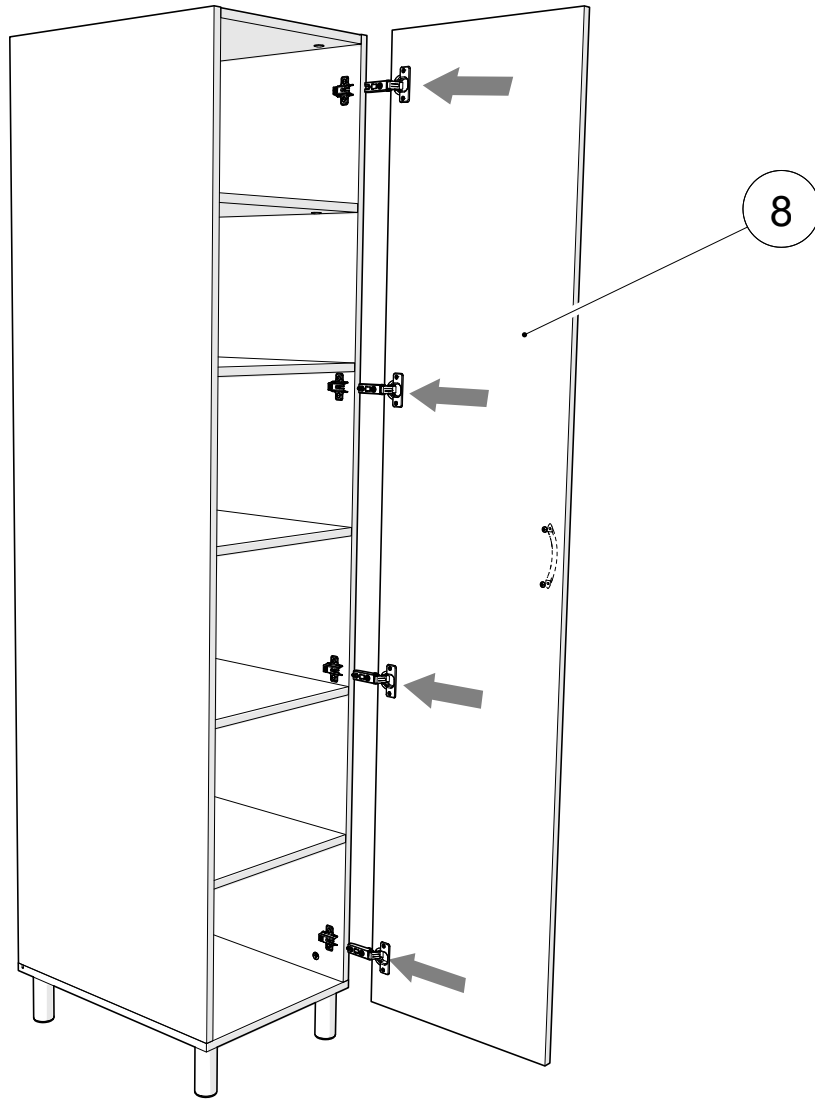

12

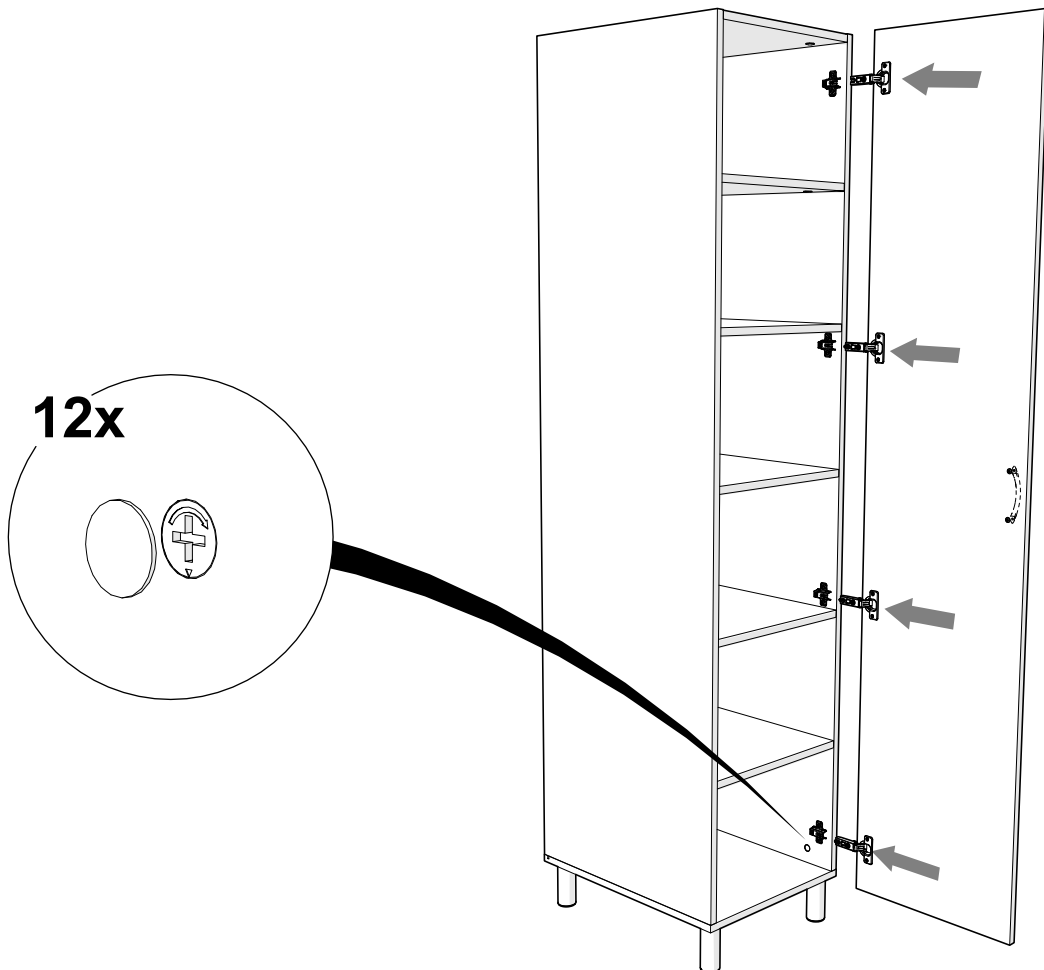

13

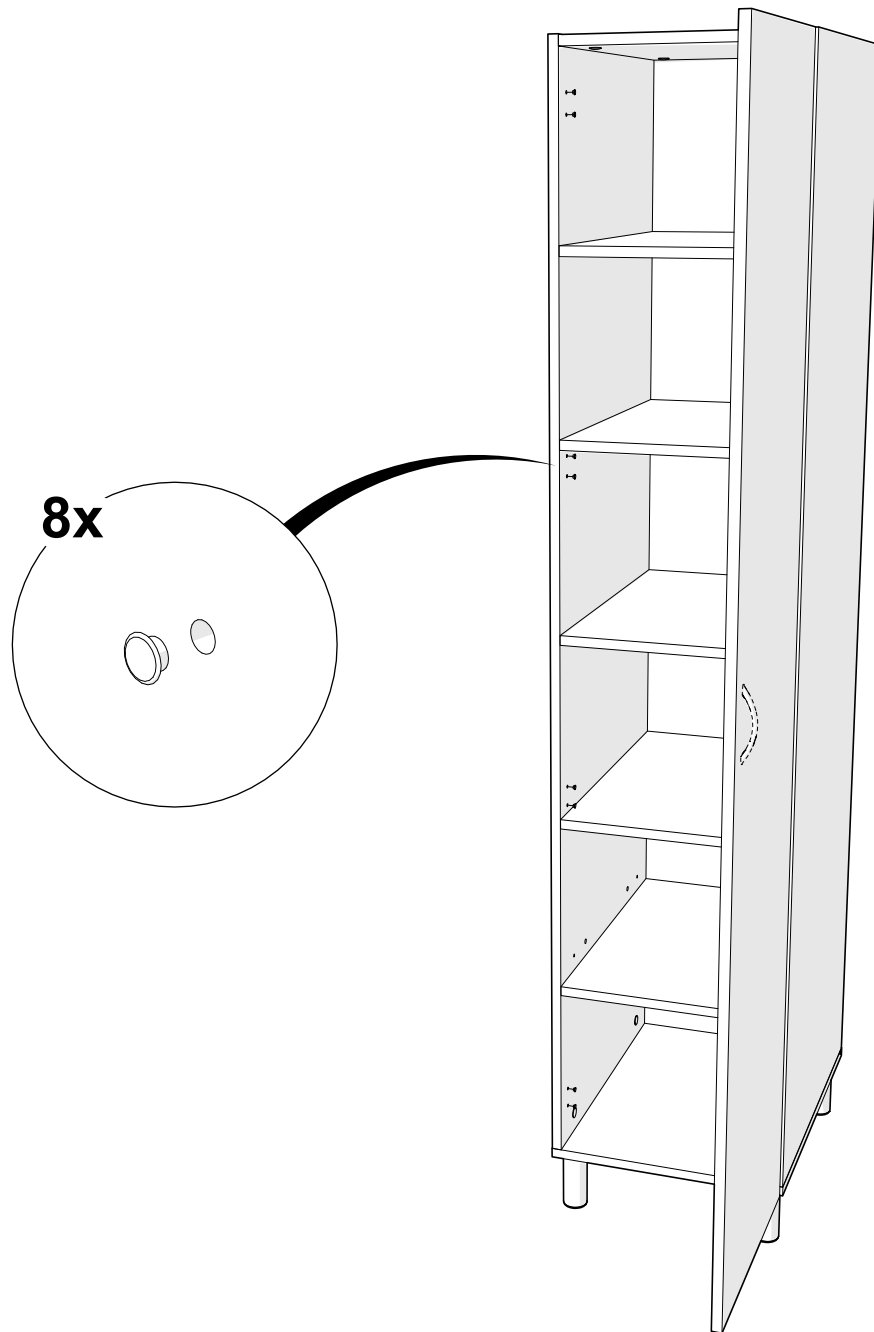

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%. Все перемещения изделия в собранном виде проводить только после полной разгрузки содержимого, съёмных полок, зеркал, и т.д. Так же необходимо зафиксировать двери в закрытом положении.

6. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Не используйте сильные кислоты и основания (оптимальный pH 6-8).
- Используйте только ПАВ, пригодные для очистки медицинского оборудования.
- Не используйте абразивные порошки, стальную стружку и другие материалы и чистящие средства, способные повредить покрытие.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

В разобранном виде шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При транспортировке и хранении в холодное время, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов. Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- порезы, царапины, сколы и др. мех. повреждения, также пятна, возникшие при эксплуатации, транспортировке, самостоятельное изменение конструкции изделия;
- разбухание деталей, появившееся вследствие воздействия воды (влаги, пара) или эксплуатации, хранения, в помещении с повышенной влажностью (более 60%);
- отслоение или частичную деформацию канта, ПВХ пленки вследствие воздействия на изделие высоких температур (свыше 60°C);
- нарушение работоспособности изделия вследствие попадания влаги или посторонних предметов внутрь механизмов;
- изменение цвета поверхностей изделия (выгорание) вследствие воздействия прямого солнечного света.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.



Штамп службы качества _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.